


P100
enttex

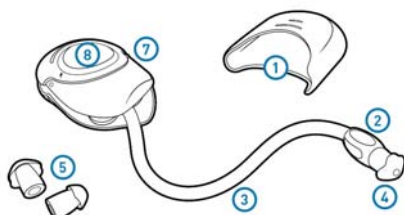

P100 Inclui

- 1 – Tampa protectora
- 2 – Adaptador de olivas
- 3 – Tubo
- 4 – Oliva
- 5 – Olivas outros tamanhos
- 6 – Bolsa (não mostrado)
- 7 – Equipamento
- 8 – Diafragma

Sobre o equipamento

O P100 foi desenvolvido por médicos otorrinolaringologistas e especialistas do ouvido, para aliviar todos os que sofrem dos sintomas da doença de Ménière.

O P100 deve ser usado juntamente com a inserção de um tubo de ventilação (grommet). Procure os conselhos do seu médico para este procedimento.

Incluído com o P100 vêm três tamanhos diferentes de olivas. A oliva de tamanho médio vem já ligada ao adaptador de olivas. A oliva sai facilmente do adaptador com uma ligeira torção e desliza facilmente para coloca-la de volta.



Para sua segurança

Não insira o adaptador de olivas no seu ouvido sem estar colocada uma oliva.

Não expor à água.



Não usar o P100 se tiver líquido no ouvido.

Não usar equipamentos que estejam danificados ou partidos.


Não tentar retirar o tubo do equipamento ou do adaptador de olivas.

Não permitir o uso deste equipamento por crianças pequenas.


Interromper imediatamente o uso deste equipamento caso o tratamento agrave os seus sintomas, cause perda de equilíbrio ou vertigens.

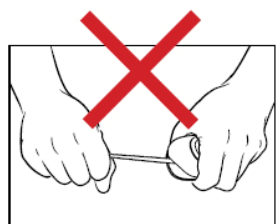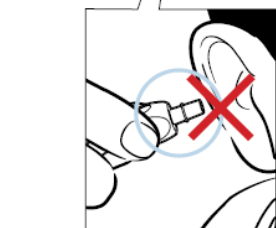


Instruções de uso

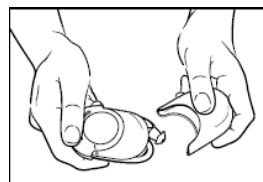

1 – Retirar a tampa protectora

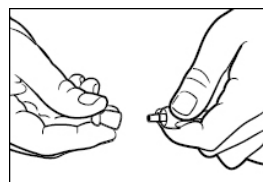


2 – Seleccione o tamanho da oliva apropriada e coloque-a firmemente no adaptador. Desenrole o tubo do equipamento.

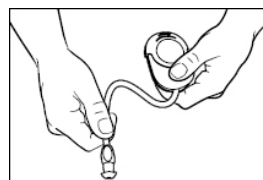


3 – Assegure-se que esta sentado confortavelmente e numa posição correcta. Para o tratamento do ouvido direito segure o adaptador na mão direita e o equipamento na mão esquerda.

Colocar o polegar no diafragma. Inserir a oliva firmemente (sem forçar) no canal auditivo rodando-a ligeiramente. Assegure um ajuste confortável e a sensação de selado. Troque de mãos quando tratar o ouvido esquerdo.

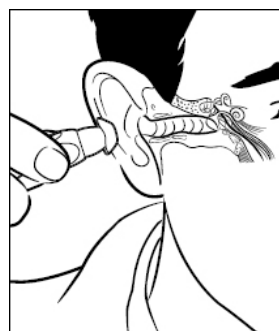

4 – Mantenha um ajuste confortável no canal auditivo durante o tratamento, mantendo a oliva na sua correcta posição. Para realizar o tratamento de baixa pressão, terá de carregar completamente no centro do diafragma com o seu polegar em qualquer um dos seguintes modos:

- a) Carregue rapidamente quatro vezes e pare momentaneamente. Repita novamente por mais três vezes.
- b) Carregue lentamente e repita os procedimentos descritos em a).
- c) Carregue firmemente e mantenha durante 5-10 segundos, liberte e repita novamente por mais quatro vezes.

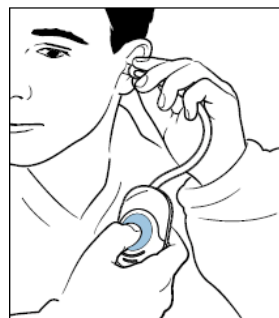

Cada tratamento é recomendado três vezes por dia ou de acordo com o prescrito.

5 – Uma vez terminado o tratamento enrole o tubo à volta do equipamento e coloque a tampa protectora.

Cuidar do seu P100

Quando não estiver a usar o P100 proteja-o de humidades, da sujidade e do pó mantendo o tubo enrolado à volta do equipamento e com a tampa protectora colocada. Mantenha o P100 afastado do calor, do sol e guardado num local seco. As olivas devem estar removidas e limpas com água e sabão. **Não** limpe as olivas se estas estiverem ligadas ao equipamento. Assegure-se que as olivas estão completamente secas antes de voltar a colocá-las no adaptador de olivas. Substitua as olivas regularmente e use apenas acessórios Enttex originais.

Responsabilidade do utilizador

É da responsabilidade do utilizador assegurar uma boa utilização do equipamento e utiliza-lo de acordo com este manual de instruções. Para evitar contaminação, o P100 não deve ser partilhado entre utilizadores. Um uso excessivo pode causar retrocesso dos sintomas.



AVISO

- Não expor à água



AVISO

- Afastar da luz solar directa